

DIY Masken Beipackzettel

Was bin ich? Ich bin eine handgenähter Behelfs-Mund-Nasen-Maske.

Wozu brauchst du mich? Mit mir schützt du in erster Linie andere Menschen vor einer Infektion durch dein Niesen oder Husten – ich diene also dem Fremdschutz. Viele Menschen sind bereits mit dem Coronavirus infiziert, ohne es zu wissen und ohne Symptome zu zeigen. Wenn du also in diesen Zeiten auf dem Weg zur Arbeit bist, in einem Wartezimmer sitzt, einkaufen gehst oder den ÖPNV nutzt, ziehst du mich auf. Am besten trägst du mich also immer, wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, denn dadurch schützt du alle andern und letzten Endes auch dich selbst!

Wie benutzt du mich?

- Vor dem Anlegen, vor dem Abnehmen und nach dem Abnehmen der Maske: immer ausführlich Händewaschen.
- Nasensteg bzw. Verstärkung andrücken (falls vorhanden).
- Beim Abnehmen der Mund-Nasen-Maske: Nur die Bänder der Maske berühren, nie die Fläche vor der Nase und dem Mund.
- Maske bis zur Reinigung in einen geschlossenen Behälter geben.
- Pflege: Wasche mich nach einmaligem Gebrauch bei mind. 60° Celsius oder koche mich in einem geschlossenen Topf für 5 Minuten aus.

Wichtig zu wissen! Ich bin eine zusätzliche Schutzmaßnahme. Nach wie vor ist es am besten, wenn...

- du zu Hause bleibst,
- zu anderen Menschen einen Abstand von 2 Metern hältst
- dir regelmäßig gründlich die Hände wäschst und auch mit Maske die Husten- und Nies-Etikette einhältst.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen für die Schutz- oder Filterwirkung von selbstgemachten Behelfsmasken keine Haftung.

Keine handgenähte Behelfsmaske ist als Medizinprodukt zertifiziert oder kommt in ihrer Schutzwirkung einer professionell hergestellten OP-Maske (medizinischer Mund-Nase-Schutz) oder einer FFP-Atemschutzmaske gleich.

Die Nutzung von handgemachten Masken geschieht auf eigene Gefahr.

Bei Masken mit Gummibändern:

Die Masken werden mit offenen Gummibändern geliefert. Sie können sie individuell anpassen und den Knoten in den Tunnel an der Seite der Maske einziehen.